



# HYALUGEL®

Acide Hyaluronique



**HYALUGEL® 1ères dents** (Dispositif médical de classe IIa) est un gel oral constitué d'une matrice polymérique autoadhésive novatrice brevetée qui adhère de façon prolongée aux dents et aux gencives en formant un film invisible souple et résistant qui exerce une action protectrice efficace.

## Indications :

Inflammations des gencives spécifiques de la petite enfance, telles celles liées aux poussées dentaires des nourrissons ou aux petits traumatismes. Les essais cliniques démontrent que la formulation particulière de **HYALUGEL® 1ères dents** réduit la douleur, le gonflement et favorise la cicatrisation.

## Mode d'emploi :

Après un soigneux lavage des mains, prendre une faible quantité de **HYALUGEL® 1ères dents** avec un doigt et masser délicatement la gencive jusqu'à ce que la zone affectée soit entièrement recouverte. Appliquer de préférence après les repas et avant de coucher l'enfant pour favoriser la formation du film et prolonger le soulagement ainsi procuré. Utiliser 3 à 6 fois par jour.

## Composition :

Eau, polyéthylèneglycol, xylitol, alcool polyvinylique, carboxyméthylcellulose sodique, huile de ricin hydrogénée PEG 40, polyvinylpyrrolidone, copolymère de méthyle vinyle éther et d'acide maléique, acide hyaluronique de haut poids moléculaire (sous forme de hyaluronate de sodium), copolymère de vinylpyrrolidone et d'eicosène, laurate glycéryle, polycarbophile, saccharinate de sodium, phosphate monosodique anhydre, choline alfoscerate, phosphate trisodique

dodécahydraté, lactate de sodium, éthylène diamine tétraacétique disodique, acide lactique et hydroxyde de sodium.

Le goût de **HYALUGEL® 1<sup>ères</sup> dents** est agréable. Il ne contient pas d'alcool, aucun sucre ou arôme artificiel, ni conservateur, ni gluten, lactose, parabènes, Laurylsulfate de sodium ou OGM.

**HYALUGEL® 1<sup>ères</sup> dents** a été testé cliniquement sur des enfants en bas âge.

Contre-indications :

L'utilisation de **HYALUGEL® 1<sup>ères</sup> dents** est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité à l'un des composants de sa formulation.

Précautions d'emploi et mises en garde :

Si **HYALUGEL® 1<sup>ères</sup> dents** doit être utilisé en même temps que d'autres produits, consulter votre médecin.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Ne pas utiliser **HYALUGEL® 1<sup>ères</sup> dents** si le tube est déjà ouvert ou endommagé avant sa première utilisation. Stocker à température ambiante, protéger des sources directes de chaleur. Ne pas utiliser après la date de péremption. Fermer le tube immédiatement après utilisation. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Conditionnement :

**HYALUGEL® 1<sup>ères</sup> dents** : tube de 20 ml

Code ACL 6007216 / EAN 3504105029388

Date de révision : Mai 2017

Distribué par :

**EXPANSCIENCE®**  
LABORATOIRES

1 place des Saisons  
92048 Paris La Défense Cedex  
France  
Tél. : 01 43 34 60 00  
[www.expanscience.com](http://www.expanscience.com)

Fabriqué par :

 RICERFARMA s.r.l.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT  
[www.ricerfarma.com](http://www.ricerfarma.com)  
Made in EU

MC400199FR/C/B  
Release May 2017